

檢驗課通知

檢字 10805

日期：2019 年 03 月 01 日

受文者：全體醫護人員

主旨：於 2019 年 03 月 01 日起，MRSA PCR (Methicillin 抗藥金黃色葡萄球菌分子檢測)採檢容器異動為雙頭採檢棒。

說明：

1. 依據總院試劑說明書規範，採檢容器異動為雙頭採檢棒(外觀如下圖)。



2. 請於採檢 MRSA PCR 檢體前，向檢驗課索取雙頭採檢棒。
3. MRSA PCR 鼻腔拭子採檢方式如下：
 - (1) 取出雙頭採檢棒，且不得將採檢棒與採檢蓋分離。
 - (2) 採檢棒頂端約 1-1.5 公分，僅將採檢棒頂端插入鼻孔採檢，不可超過 1.5 公分。
 - (3) 採檢過程須避免血液、鼻分泌物、粘液或用於緩解充血的鼻腔噴霧，鼻腔太過乾燥或其它刺激物都可能抑制檢驗反應。
 - (4) 每一個鼻孔須插入採檢棒的”雙頭”進行採檢，於各鼻孔內側旋轉 3 秒，並用手指輕輕按壓鼻子外側，確保採檢棒和鼻子內部之間有良好的接觸。
 - (5) 擰開運送管管帽並丟棄，將採檢棒放入傳送試管中。確保採檢棒插在底部的海綿上，並盡速送檢。



4. 各臨床單位若有庫存未使用之白頭鼻咽拭子，請一併繳回檢驗課。
5. 相關問題，請聯絡檢驗課，分機 7074~7077。

檢驗課